

Urimed Vision

Instrucțiuni de utilizare

Cateter extern auto-aderent, din silicon, pentru bărbați.

DESCRIERE / INDICAȚII

Cateterul Urimed® Vision este un cateter extern pentru bărbați, autoadeziv, conceput pentru managementul incontinenței urinare masculine. Este disponibil în cinci dimensiuni variind de la mici (25 mm) până la Extra Large (41 mm).

CONTRAINDICAȚII

Nu folosiți pe pielea iritată sau compromisă.

PRECAUȚII

Nu utilizați în cazul în care apar reacții alergice sau sensibilitate.

MOD DE APLICARE:

- 1) Se spală penisul cu apă caldă și săpun delicat. Se usucă bine.
- 2) Se îndepărtează părul pubian, dacă este necesar.
- 3) Se deschide ambalajul pe linia perforată.
- 4) Pentru a elimina inserția din material plastic, strângeți cateterul la capătul superior al conului alb și trageți pentru a-l elibera. Numai versiunile "Ultra" și "scurt".



- 5) În cazul în care pacientul este necircumcis, NU decalotați.
- 6) Nu se aplică pudre sau creme, deoarece acest lucru ar putea împiedica o etanșare sigură.
- 7) Derulați cateterul autoadeziv peste penis.



- 8) Strângeți ușor cateterul pentru a sigila corect adezivul pe piele.



IMPORTANT: Timpul de utilizare poate fi redus în mod semnificativ în cazul în care adezivul nu este sigilat corespunzător pe piele.

- 9) Se conectează la un dispozitiv de drenaj.

MOD DE ÎNDEPĂRTARE

Se rulează încet cateterul de pe penis. Se spală penisul cu săpun delicat și apă caldă. Se usucă bine. De unică folosință.



AVERTIZARE

Re-utilizarea de dispozitive de unică folosință creează un risc de potențial pentru pacient sau utilizator. Aceasta poate duce la o contaminare și / sau insuficiență capacitatea de funcționare. Contaminare și / sau funcționalitate limitată a dispozitivului poate duce la răni, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.

Producător: B. Braun Medical S.A.S.

204, Avenue du Marechal Juin
92107 Boulogne Cedex, Franța

Distribuitor: B. Braun Medical S.R.L.

Remetea Mare nr. 636 DN 6, 307350 Timiș,
România,
Tel. 0256 28 49 05, www.bbraun.ro

	Ø	Product Code	D REF	Cont/Inh
STANDARD	25 mm	IH2525	28625	30 Pcs./St.
	29 mm	IH2529	28629	
	32 mm	IH2532	28632	
	36 mm	IH2536	28636	
	41 mm	IH2541	28641	
ULTRA*	25 mm	IH3525		30 Pcs./St.
	29 mm	IH3529		
	32 mm	IH3532		
	36 mm	IH3536		
	41 mm	IH3541		
SHORT	25 mm	IH4525	28825	30 Pcs./St.
	29 mm	IH4529	28829	
	32 mm	IH4532	28832	
	36 mm	IH4536	28836	
	41 mm	IH4541	28841	